

Bruksanvisning för HandCheck® vision

HandCheck® vision komplett och innehåller följande:

- HandCheck® vision (hopfällbar)
- Nätadapter
- Bruksanvisning, övriga handlingar samt garantibevis.

Packa upp HandCheck® vision utrustningen och fäll ut sidostycken och bakstycke (tryck till sidorna mot kardborrbandet ordentligt tills ett klick hörs) samt anslut laddkabeln till uttaget på baksidan samt laddaren till nätkontakten, 220 V 50 Hz. Lysdioden lyser röd om laddning fordras, annars grönt.

Packa ihop HandCheck® vision genom att först fälla in vänster sida och sen höger sida och sist bakstycket. Se till att bakstycket fäster mot kardborrbandet så att enheten håller ihop.

När HandCheck® vision används för första gången skall laddning alltid ske först. Laddning skall pågå tills lysdioden på framsidan lyser grönt.

Slå på HandCheck® vision genom att trycka in strömbrytaren på framsidan och en grön lysdiod tänds. HandCheck® vision kan nu användas i ca 4 timmar utan laddning och indikerar när laddning skall ske. Om längre tids användning behövs kan laddaren vara kopplad permanent, två lysdioder lyser då på framsidan (röd och grön).

Anslutning för kamera*

På fronten finns en USB anslutning för kamera (extra utrustning).

Anslutning för dator*

På baksidan finns en USB anslutning för dator. Bilden från kameran kan då visas på datorns bildskärm eller via en projektor i storbildsformat (extra utrustning)

Skötsel/Rengöring

Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel när ni vill göra rent utrustningen.

LED-Lampor

Apparaten är utrustad med LED-lampor (42 st) som har en lystid på minst 5000 timmar.

Emissionsområdet ligger mellan 320 nm – 400 nm (UVA),

max 365 nm. Effektiv strålningsstyrka UVA (0,5 m) ~ 1,2 W/m².

Om någon av LED-lamporna skulle sluta fungera behöver detta inte betyda att HandCheck® vision inte fyller sin avsedda funktion. Om funktionen däremot skulle avta väsentligt och om problemet kvarstår rekommenderar vi att ni skickar in utrustningen till oss för översyn och eventuell renovering.

Genomförande av handdesinfektions test

Sätt apparaten på lämplig plats så att infallande ljus inte hindrar det vita fluorescerande ljuset från att synas. Använd så mörkt underlag som möjligt.

Gör en normal handdesinfektion med ecocontrast®.

För att studera händerna i HandCheck® vision sätter sig testpersonen framför apparaten och för in händerna i öppningen.

I ljuset från HandCheck® vision kan man då avgöra om man har gjort en bra eller en sämre handdesinfektion. Där det lyser "vitt" är där man har lyckats och gjort en bra handdesinfektion, däremot om man har mörkare fläckar har man missat att påföra desinfektionsmedel på rätt sätt.

Vi rekommenderar att händerna tvättas efter testet för att ta bort överskottet av testmedlet.

Varning

- Använd endast den medlevererade laddaren.
Input AC 100-240V, 50-80Hz max 450mA, Output 50 DC-3A
- Laddaren får enbart användas för inomhusbruk.
- Rengör aldrig de elektriska delarna med vatten.
- Beakta bruksanvisning och arbetskyddsnormer vid installation och användning av UV-belysning.
- **OBS!** Titta aldrig direkt in i tända UV-lampor utan skyddsglasögon då detta kan skada synen.
- Vid användning av vissa mediciner, t.ex. vissa antibiotika eller vid överkänslighet, bör testpersonen informera sig om ifall detta medför ökad UV-känslighet hos huden.

Personer som har opererats mot grå starr bör rådfråga läkare.

I enstaka fall kan UV-skyddsglasögon behövas.

**Testmedel och utrustning för dator och kamera kan beställas separat.*