



Kiilto Pro Easydes Spray

Desinficerande rengöringsmedel



Bruksfärdigt, snabbverkande ytdesinfektionsmedel med alkohol och en god mikrobicid effekt samt goda rengörande egenskaper.

Användningsområde	För alla material som tål alkoholer: beröringsytor, utrustning (även tangentbord på telefoner och datorer) och instrument.	
Produktegenskaper	Etanolbaserad desinfektionsmedelsblandning som innehåller tensid. Kiilto Pro Easydes är snabbverkande och har ett brett spektrum av mikrobicid effekt och det dödar effektivt bakterier, olika virus och jästsvamp. Produktens mikrobicida effekt har testats: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, jäst och mögel), EN 13624 (jästsvamp), EN 14348 (tuberkulos och mykobakterier), EN 14476 (adeno- och norovirus), Desinfektionseffekt och ett gott rengöringsresultat uppnås lätt även på synligt kontaminerade ytor och medlet tar effektivt bort smuts och fett.	
Bruksanvisning	Spraya desinfektionsmedel på ytan eller på torkduken och bearbeta området som ska behandlas under angiven kontakttid. Lämna lätt fuktig och låt lufttorka. Produkten kan även doseras direkt på en tvättbar städduk eller en städduk för engångsbruk. Ytorna behöver inte förtvättas. Om ytan som desinficerats ska komma i direktkontakt med livsmedel rekommenderas att man eftertorkar den med vatten. För övrig användning behövs ingen eftersköljning.	
Obs	Får inte användas på varma ytor.	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Etanol	62,3 p-% biocid
	2-propanol	5 - <15 % denatureringsmedel
pH koncentrat	7.0 neutral	
Förvaring	I rumstemperatur 3 år.	
Utseende och doft	Klar, oparfymerad vätska	
Tillverkningsland	FINLAND	
Användar- och miljösäkerhet	Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart material. Produkten är biologiskt nedbrytbar.	

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 750 ml

8183

6417964081831

6417964482454



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.