



Rengöringsguide för narkosblåsor i latex

FioniaVet narkosblåsor i svart antistatisk latex är oundgängliga produkter vid anestesi. Latex är ett naturligt, "levande" material som oundvikligen förändras över tid. För att säkerställa lång livslängd och optimal prestanda ska de rengöras och förvaras enligt följande riktlinjer:

Rengöring/desinfektion

Att rengöra narkosblåsorna är avgörande för att upprätthålla god hygien, säkerställa funktionalitet och förlänga blåsans livslängd.

Användning:

Mild tvål, varmt (inte hett) vatten eller desinfektionsmedel för medicinskt bruk (t.ex. klorhexidinlösning eller Virkon S), mjuk trasa, handskar och ett torkställ.

Steg:

- **Förrengöring:** Skölj med varmt vatten för att avlägsna rester.
- **Tvätt:** Rengör varsamt med mjuk trasa eller svamp och mild tvål. Undvik att skrubba eller vrida.
- **Sköljning:** Avlägsna all tvål med rent, varmt vatten.
- **Desinfektion:** Fyll eller sänk ner blåsan i utspädd desinfektionslösning i 10–15 minuter, skölj sedan noggrant efteråt. Observera att kemikalier kan förkorta blåsans livslängd eftersom latex kan brytas ned.

Torkning

- Skaka av överflödigt vatten och låt lufttorka med öppningen nedåt eller på ett ställ, skyddad från solljus och värme. Säkerställ att påsen är helt torr innan den läggs i förvaring.

Sterilisering (endast när påsen är helt torr):

- Autoklavera vid högst 121°C i 15 minuter vid 15 psi
- ETO
- Kall kemisk desinfektion, t.ex. klorhexidinlösning eller Virkon S, låt ligga i 15–30 minuter. Skölj noggrant efteråt för att avlägsna desinfektionsrester.

Underhåll

- Kontrollera regelbundet om det finns sprickor eller skador. Applicera talk eller latexbalsam för att hålla materialet smidigt. Byt ut skadade blåsor.

Förvaring

- **Svalt och torrt:** Förvara vid 10–25°C med låg luftfuktighet för att motverka nedbrytning.
- **Undvik sol och värme:** Förvara skyddat från direkt solljus, element och andra värmekällor för att skydda latexet.
- **Ozonfri miljö:** Förvara åtskilt från utrustning som avger ozon, t.ex. elektriska motorer.
- **Rätt förpackning:** Använd originalförpackning eller ventilerade påsar för att skydda mot damm och andra föroreningar.
- **Ingen vikning:** Förvara i naturlig form för att bevara elasticitet och integritet.

Genom att följa dessa riktlinjer behåller narkosblåsorna sin flexibilitet, hållbarhet och övergripande prestanda.