

DYNACAST® PRELUDE

BRUKSANVISNING



1

Öppna lådan och dra ut rullen till önskad längd. Det finns en centimeterskala på rullen.

2

Klipp av i önskad längd.

3

Vik ihop gipset och lägg tillbaka det i påsen. Stäng sedan påsen med påsklämman.

4

Dra ut det avklippta gipset ur påsen. Öppna vadden och skär av 5 mm i varje ände så att den täcker gipset helt. Runda eventuellt till hörnen med saxen.

5

Lägg vadden runt gipset igen och doppa gipset i ett vattenbad (högre temperatur ger snabbare härdning).

6

Lägg gipset i en handduk och rulla ihop handduken runt gipset. Det gör att vattnet pressas ut så att gipset inte är blött när det läggs på.

7

Gipset kan sedan formas och anpassas innan det läggs på direkt på den önskade extremiteten.

8

Se Essitys YouTube-kanal för fler instruktionsfilmer.

