



Lomatuell H

Salvkompress

Egenskaper:

Lomatuell H består av en högkvalitativ väv i bomull. Den är impregnerad med paraffin och fastnar därför inte i såret. Detta möjliggör en rad olika användningsområde inom sårbehandling. Nätstrukturen och salvmängden på kompressen gör den lämplig vid vätskande sår för optimal dränering av exsudat. Kompressen sörjer samtidigt för en god ventilation av såret. Komplettera med ett absorberande täckförband.

Indikationer:

Utmärkt vid ytliga sår, mindre brännskador, tagställen, transplanterat och olika dermatologiska indikationer. Vidare indikationer är granulerande sår och postoperativt vid plastikoperationer.

Omlägningsfrekvens:

Lomatuell H bör bytas när vaselinet blivit flytande och är absorberat. Detta sker vanligen efter ca 1-3 dagar.

Material:

Gasvävsnät av 100% bomull. Paraffin av neutral hydrofob vit vaselin.

Förpackningar:

Produktförpackning av polyester, polyetylen och cellulosa
Avdelningsförpackning av cellulosa
Transportförpackning i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras torrt och rent i rumstemperatur (inte över 250).
Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum.

Produktklassificering:

CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt

Avfallshantering:

Produkt hanteras enligt lokala riktlinjer för avfallshantering
Produktförpackning hanteras som brännbart avfall
Avdelningsförpackning källsorteras eller som brännbart avfall
Transportkartong källsorteras

Finns även steril i rulle om 7m.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trfp
5x5cm	23 314	10	360
10x10cm	23 315	10	120
10x10cm	23 318	50	450
10x20cm	23 316	10	120
10x30cm	23 317	10	80

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.