

# BD Vacutainer® Plasmarör (Heparin)



Användningsområde: BD Vacutainer® plasmarör används normalt för kliniskt kemiska plasmaanalyser.

Tillsatser: Röret innehåller natrium- eller litium-heparin. Koncentrationen av litium- eller natrium-heparin i BD Vacutainer® plasmarör är 17 IE heparin/ml blod. Tillsatsen har sprejats på insidan av plast-rören.

Blandningsrekommendation: Plasmarör ska blandas försiktigt 8-10 gånger.

Centrifugeringsanvisningar: 1300 G under 10 minuter i rumstemperatur. BD Heparinrör kan centrifugeras direkt efter provtagning.

Annat: Rören finns i ett antal storlekar, i plast, och har en grön Hemogard™ förslutning.

**NYHET:** BD erbjuder Na-Heparinrör som följer den nya svenska standarden SS872805:2012

| BD art nr                                                                      | Tillsats       | Volym | Storlek (mm)  | Färg | Etikett     | Avd./Transp. förp |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|------|-------------|-------------------|
| <b>BD Vacutainer® Litium-Heparinrör i plast med grön Hemogard™ förslutning</b> |                |       |               |      |             |                   |
| 368494                                                                         | Litium-Heparin | 2     | 13 x 75 (5)   |      | Papper      | 100/1000          |
| 368272                                                                         | Litium-Heparin | 2     | 13 x 75 (5)   |      | Transparent | 100/1000          |
| 368496                                                                         | Litium-Heparin | 4     | 13 x 75 (5)   |      | Transparent | 100/1000          |
| 368884                                                                         | Litium-Heparin | 4     | 13 x 75 (5)   |      | Papper      | 100/1000          |
| 368886                                                                         | Litium-Heparin | 6     | 13 x 100 (7)  |      | Papper      | 100/1000          |
| 367526                                                                         | Litium-Heparin | 10    | 16 x 100 (10) |      | Papper      | 100/1000          |

|                                                                                 |                 |   |              |  |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|--|--------|----------|
| <b>BD Vacutainer® Natrium-Heparinrör i plast med grön Hemogard™ förslutning</b> |                 |   |              |  |        |          |
| 367869                                                                          | Natrium-Heparin | 4 | 13 x 75 (5)  |  | Papper | 100/1000 |
| 367876                                                                          | Natrium-Heparin | 6 | 13 x 100 (7) |  | Papper | 100/1000 |

|                                                                                    |                 |   |              |  |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------------|--|-------------|----------|
| <b>BD Vacutainer® Natrium-Heparinrör i plast med mörkblå Hemogard™ förslutning</b> |                 |   |              |  |             |          |
| 369623                                                                             | Natrium-Heparin | 4 | 13 x 75 (5)  |  | Transparent | 100/1000 |
| 369622                                                                             | Natrium-Heparin | 6 | 13 x 100 (7) |  | Transparent | 100/1000 |

Kontakta oss gärna för att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer™ plasmarör



2014

Becton Dickinson AB • Tlf: 08-775 51 00  
bdsweden@europe.bd.com • www.bd.com