

Suprasorb® X

Cellulosaförband med vatten

Bruksanvisning




Suprasorb®X består av:

- cellulosa
- vatten
- 0,085% klorhexidinglukonat

Suprasorb® X

- frisätter fukt
- absorberar överflödigt vätska
- eller båda - samtidigt
- efter behov i varje enskilt fall

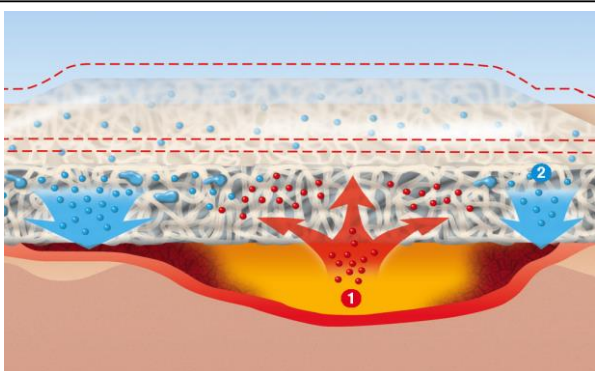

- ✓ Ett lämpligt sekundärförband (t.ex. Suprasorb® F, Suprasorb® P) ger extra stöd åt den reglerande effekten av absorptionen och/eller frisättningen av vätska.



Suprasorb® X produkterna är de enda sårförbanden som kan absorbera och frisätta fukt, efter behov, samtidigt och oberoende.

Suprasorb X®

- det enda sårförbandet som reglerar fukt efter behov

Egenskaper:

✓ Hydrobalans - samtidig absorption och rehydrering

Unik kompress med förmåga att "känna av" sårets status, dvs. om det behövs tillföras fukt eller absorberas - sker oberoende eller båda samtidigt, efter behov i varje enskilt fall.

- ✓ Den är mjuk och elastisk och formar sig efter sårets konturer samtidigt som den är stabil i sin struktur.

✓ Suprasorb®X - lindrar smärtan effektivt

Kliniska studier visar att Suprasorb® X:

- reducerar smärtan genom fuktnreglering - HydroBalance
- har en behagligt svalkande effekt
- har en lindrande och lugnande effekt på omgivande hud runt såret

✓ Suprasorb®X - kontrollerar fuktbalansen:

- i sår som är torra och lätt till måttligt vätskande
- i torra, nekrotiska sår
- i alla faser av sår läkningen
- i djupa och ytliga sår

Indikationer:

- ✓ Icke infekterade sår som är:

- torra eller lätt till måttligt vätskande
- ytliga eller djupa

t.ex.

- arteriella och venösa sår
- trycksår
- diabetessår
- 2:e gradens brännskador
- post-operativa sår
- hud donator / transplanterat områden

✓ Kontraindikation:

- 3:e gradens brännskador

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av polyester, polyetylen och aluminium
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras rent och torrt mellan +5° upp till +30°
- ✓ Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt
- ✓ Enligt EN- Standard 13726-1

Avfallshantering

- ✓ Produkt hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackning hanteras enligt lokala rutiner för aluminium
- ✓ Avdelningsförpackning källsorteras el hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportkartong källsorteras

Sterilförpackade kompresser samt tamponadband. Särpackade.

Storlek	Lev artnr	Avd fp	Trsp fp
5x5 cm	20 534	5	90
9x9 cm	20 531	5	80
14x20 cm	20 532	5	65
2x21cm, tamponad	20 533	5	130

Bruksanvisning



1. Rengör såret enligt gängse rutiner och torka därefter sårområdet torrt och omsorgsfullt med sterila sårkompresser.



2. Applicera Suprasorb® X på såret och forma efter såret. Ifall en tamponad används ska tamponaden vikas flera gånger och appliceras löst i sårhålan.



3. Fixera med lämpligt sekundärförband beroende på mängden exsudat: vid icke-infekterade sår använd Suprasorb® X med t.ex. Suprasorb® F, Suprasorb® P eller Vliwazell®.

Applicering av förbandet:

- Förbandets storlek beror på sårets storlek, överlappa såret med 2-3 cm.
- Öppna den sterila påsen och ta ut förbandet. Ta bort skyddsfilmerna på båda sidor. Endera sidan av förbandet appliceras på såret.
- Vid behov kan förbandet och tamponaden klippas till i rätt storlek med en steril sax. Placera förbandet på såret, jämna ut det och fixera med lämpligt sekundärförband (t ex Suprasorb® F sårfilm, Suprasorb® P polyuretanförband eller Vliwazell® abs förband).

Byte av förband:

Hur ofta Suprasorb® X Hydrobalans sårförband/tamponad ska bytas bestäms av ansvarig läkare beroende på sårets läkningsfas.

Förbandet kan sitta upp till 7 dagar.

- Ta bort sekundärförbandet
- Ta försiktigt bort Suprasorb® X Hydrobalans sårförband/tamponad genom att lyfta ena hörnet och försiktigt dra bort förbandet från såret alternativt dra försiktigt bort Suprasorb® X Hydrobalans tamponad från såret.
- Kasta förbandet eller tamponaden.
- Rengör såret innan nytt förband eller ny tamponad appliceras.

Försiktighetsåtgärder:

Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om något av följande inträffar:

- Tecken på infektion, såret ändrar färg och/eller lukt
- Sårläkningen avstannar
- Överkänslighet mot förbandet eller andra oväntade symtom

Om förbandet har torkat:

Förbandet ska hållas fuktigt och kan då sitta upp till 7 dagar. Välj lämpligt sekundärförband beroende på hur mycket såret vätskar. Om förbandet ändå har torkat, återfukta det med NaCl.

"Washing effect":


När man har lyft på förbandet kan huden runt såret ha en vitaktig beläggning, som består av döda hudepitelceller. Anledningen är att förbandet tvättar huden runt såret och lyfter upp de döda hudepitelcellerna. Efter rengöring ser man intakt och slät hud.

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.

Förbandsbyte

Suprasorb® X: en blåsa byggs upp i sårområdet

Kompressen har återfuktat huden runt såret och blir pergamentliknande

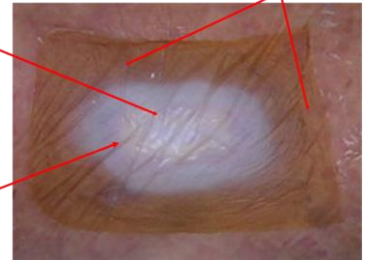

Halvtransparent – visuell inspektion av såret är möjlig

Kompressen skall bytas tidigare

Suprasorb® X kompressen har torkat ut och återfuktning bör ske innan avlägsnande.



"Washing effect"

Innan sårrengöring:

Vitaktig beläggning på huden runt såret



Efter sårrengöring:

Epitelvävnaden är intakt

