


## En aktiv behandling!

- För en optimal fuktbalans

**Suprasorb® X+PHMB** är ett aktivt, antimikrobiellt cellulosaförband. Förbandet är unikt i sin klass då det både kan absorbera och deponera fukt i såret allt efter sårets behov, så kallad hydrobalans. Förbandet används för lätt till måttligt vätskande sår.

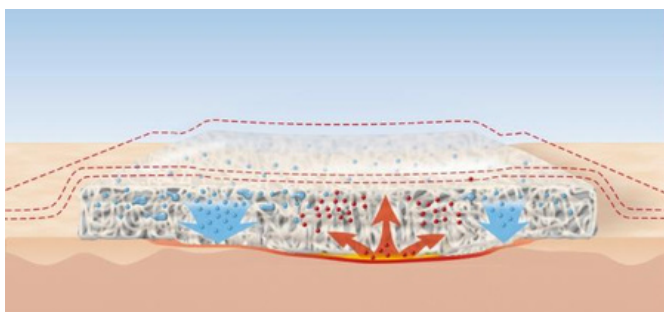

## Antimikrobiella egenskaper

**Suprasorb® X+PHMB** har mycket goda bakteriedödande egenskaper, samt god förmåga att luckra upp biofilm. PHMB, som har en effekt jämförbar med silver, avdödar ett brett spektrum av patogener, såsom aeroba och anaeroba bakterier, svamp och mögel.

### Snabbt tillslag



- Avdödar på kort tid en stor del av biobördan.

### Anpassningsbart




- Förbandet är klippbart
- Anpassar sig till sårets strukturer och lämpar sig väl för sår på kroppsdelar som är svåra att lägga om.

### Viss smärtlindring



- Många patienter uttrycker en svalkande och smärtlindrande effekt av förbandet.

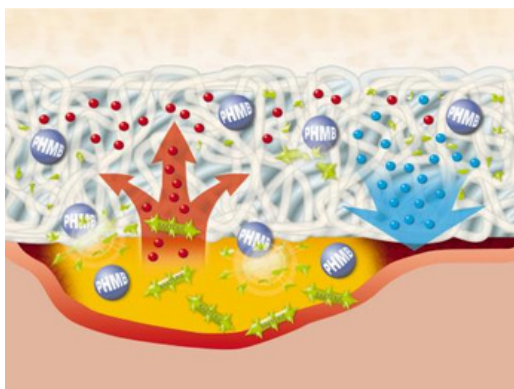

## Indikationer

- Kritiskt koloniserade och infekterade sår
- Diabetessår
- II:agradens brännskador
- Arteriella och venösa bensår
- Trycksår
- Delhudstransplantat och tagställe
- Postoperativa sår

## Funktion

Genom hydrobalansen kan PHMB vara aktivt i såväl förbandet som i såret, helt beroende på sårets egenskaper. Då såret avlastas från biobördan minskar inflammationen och patienten upplever en smärtlindring. Detta stöttar även tillväxten av granulationsvävnad.

## Användaranvisning

1. Rengör såret ordentligt enligt ordination och lokal rutin.  
Omgivande hud ska vara ren och torr.
2. Öppna den sterila förpackningen och ta ut förbandet. Avlägsna skyddsfilmen.
3. Anpassa förbandet efter sårets storlek, förbandet ska gå 2-3 cm utanför sårets kanter.  
Förbandet kan klippas med en steril sax.
4. Placera förbandet på såret, båda sidor kan läggas mot såret. Jämna ut och fixera med lämpligt täckförband.  
Tamponad appliceras genom att försiktigt placera den i såret och vika ihop i flera lager. Packa inte materialet för hårt i såret.

## Att tänka på vid omläggning

### Washing effect

Mellan omläggningarnakanensåkallad washingeffectuppstå och syns som en mjölkvit yta på den omgivande huden. Detta är inget som skadar huden och torkas enkelt bort med en fuktad kompress.



Före avtvättning



Efter avtvättning

### Torr förband

Omförbandet har suttitförlänge, eller omsåret har varit för torrt kan det hända att förbandet torkar in. Det ser då ut som på bilden nedan. För att avlägsna förbandet behöver det återfuktas med koksalt i ca 10 minuter.



Intorkat förband

### Produktmaterial

- 3-5% cellulosa
- 95-97% vatten
- 0,3% PHMB

### Suprasorb® X+PHMB

- är CE-märkt enligt MDR klass III
- förvaras torrt och rent i rumstemperatur
- är hållbar i 3 år från produktionsdatum
- har en förpackning av cellulosa, polyester och aluminium
- har en avdelningsförpackning av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- kommer i en transportkartong i wellpapp av cellulosa vilken källsorteras som pappersförpackning
- produkten hanteras som brännbart avfall

### Beställningsinformation

| Storlek           | Lev.art.nr. | Avd.fp | Trp.fp |
|-------------------|-------------|--------|--------|
| 5x5 cm            | 20 540      | 5      | 90     |
| 9x9 cm            | 20 541      | 5      | 80     |
| 14x20 cm          | 20 542      | 5      | 65     |
| 2x21 cm, tamponad | 20 543      | 5      | 130    |

Var god se bipacksedelför ytterligare information.