



Vliwasorb®

Vliwasorb® Adhesive

-superabsorberande elastisk sårkompress med spärrskikt

Egenskaper:

- ✓ Mjukt, **elastiskt** och flexibelt superabsorberande sårförband med superabsorbenten inkapslad i cellulosa.
- ✓ Binder höga volymer vätska inklusive bakterier vid behandling av kraftigt vätskande sår, vilket minskar risken för maceration.
- ✓ Erbjuder glesare förbandsbyten.
- ✓ Har ett spärrskikt för att förhindra läckage mot kläder, sänglinne
- ✓ Förbandet är lätt att applicera.
- ✓ Har en hudvänlig elastisk häftkant, med mycket god vidhäftning. Ingen extra fixering krävs. Speciellt lämpad för områden där det normalt är svårt att fästa ett förband.

Indikationer:

- ✓ För behandling av kraftigt till måttligt vätskande sår t ex trycksår, arteriella sår, venösa bensår, diabetiska sår, vid postoperativ läkning, laparatomisår, fistlar mm.
- ✓ Används som superabsorberande kompress att lägga som primärförband.
- ✓ Används också som sekundärförband för kraftigt vätskande sår i kombination med t ex alginatförband Suprasorb A, Suprasorb A+Ag och Vliwaktiv Ag
- ✓ Kan användas vid kompressionsbehandling.

Att beakta:

- ✓ Använd ej i djupa sårfläckor eftersom produkten kan expandera betydligt när sårvätskan absorberas. Ska ej klippas!

Omlägningsfrekvens:

- ✓ Omlägningsfrekvens av Vliwasorb högabsorberande sårförband avgörs av ansvarig läkare, sköterska, beroende på sårets tillstånd (mängden exsudat m m).

Material:

- ✓ Ytskikt av icke vidhäftande, perforerad och elastisk polyetylen.
- ✓ Absorberande mellanskikt av superabsorbentpolymer (sodium polyacrylat) inkapslat i cellulosa
- ✓ Blått spärrskikt av nonwoven i polypropylen
- ✓ Häftmassa av hudvänlig polyakrylat

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av cellulosa och polyetylen
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras torrt och rent i rumstemperatur
- ✓ Rätt förvarad är produkten hållbar i 3 år från tillverkningsdatum

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt
- ✓ Testad enligt EN-Standard 13726-1

Avfallshantering:

- ✓ Produkten hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackningen hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningsförpackningen källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportkartongen källsorteras

Storlek	Sårdyna	Lev art nr	Avdfp	Trpfp
Med häftkant				
12x12cm S	8,1x8,2cm	30 991	10	360
15x15cm S	10,5x10,5cm	30 992	10	360
15x25cm S	10,5x20,5cm	30 993	10	110
Utan häftkant				
7,5x7,5cm S		34 500	10	360
10x10cm S		24 501	10	360
10x20cm S		24 502	10	340
20x20cm S		24 503	10	300
20x30cm S		26 904	10	180

Bruksanvisning:

För behandling av kraftigt vätskande sår, t ex trycksår, arteriella sår, venösa bensår, postoperativ läkning, laparatomisår, fistlar, superficiella andra gradens brännskador.

1) Förberedning av såret:

Före applicering av nytt förband, rengör såret enligt rutin och torka sårkanterna.

2) Applicering av sårförbandet:

Storleken av förbandet avgörs av sårstorleken – förbandet bör överlappa såret med ungefär 2-3cm. Stryk ut förbandet försiktigt över såret och pressa ner kanterna.

3) Förbandsbyte:

Intervallerna för byte av Vliwasorb högabsorberande sårförband avgörs av ansvarig läkare, sköterska, beroende på sårets tillstånd (mängden exsudat m m)

Att beakta:

- ✓Vliwasorb ska inte rivas av eller klippas.
- ✓När maximal absorptionskapacitet har uppnåtts kan ytterligare fastsättning av förbandet behövas för att undvika skjuvkrafter i den adhesiva ytan.
- ✓Produkten är steril om inte förpackningen är öppnad eller skadad.

För ytterligare information, var god se bipacksedel.