



Kortfattad instruktion

Analysera ett prov

1. Sätt in chip när g-pet är avslagen. När chipet är insatt slås g-pet igång. Tryck ▲ eller ▼ för att välja rätt djurslag;



(Katt)



(Hund)

Hor (Häst)

2. Kontrollera att koden som visas stämmer med teststickornas kod och tryck **M** för att spara. Dra bort remsan.
3. Ta ut en teststicka och återslut förpackningen direkt (förvaras i rumstemperatur).
4. Sätt in teststickan i teststicksporten, med vita sidan uppåt. g-Pet PLUS+ kommer startas automatiskt.
5. Koden för djurslaget visas. Kontrollera att detta stämmer med teststickornas kod. 6. Tryck ▲ eller ▼ för att välja måltidsindikator;



(före måltid)



(efter måltid)

Inget val

7. När g-Pet PLUS+ är redo för ett test kommer ● ikonen börja blinka.
8. Ta provet med hjälp av en insulinspruta eller medföljande lansett.
9. Kassera den första droppen blod. Sätt provet till änden av teststickan tills mätaren piper.
10. Resultatet visas i 5 sekunder och sparas i minnet.

Analysera kontrollösning

1. Starta igång mätaren som ovan. Välj vilket djurslag.
2. Sätt in teststickan i teststicksporten, med vita sidan uppåt.
3. När g-Pet PLUS+ är redo för ett test kommer ● ikonen börja blinka.
4. Tryck och håll inne **M**-knappen i 2 sekunder tills ◀C ikonen syns i displayen.
5. Blanda kontrollösningen, kassera sedan första droppen.
6. Kläm ut en liten droppe lösning på en ren yta och tillsätt lösningen till änden av teststickan och håll tills mätaren piper.

7. Efter 5 sekunder visas resultatet och sparas i minnet.
8. Jämför resultatet med det specificerade området på teststickornas förpackning.
9. Kassera använda stickor genom att trycka ner den gröna knappen. Sorteras som biologiskt avfall.

När ska man analysera kontrollösning?

- När du använder g-Pet PLUS+ för första gången
- En gång i veckan för att kontrollera funktionen
- När du börjar använda en ny batch teststickor

Vad gör man om kontrollen ligger utanför normalområdet?

- Har analysen utförts korrekt?
- Har kontrollösningen passerat utgångsdatum eller lagrats felaktigt?
- Har teststickorna passerat utgångsdatum eller lagrats felaktigt?
- Har g-Pet PLUS+ rätt kod på chip/teststickor?

Om du behöver hjälp, var god kontakta din lokala leverantör.