

BD Vacutainer® Serumseparationsrör SST™ II Advance



Användningsområde: BD Vacutainer® serumseparationsrör används normalt för kemiska serumanalyser. BD SST™ II Advance är lämpade för läkemedelsanalyser.

Tillsatser: BD SST™ II Advance-rör innehåller en koagulationsaktivator för snabbare koagulation. BD SST™ II Advance innehåller även en förbättrad gel som har tagits fram av BD för att uppfylla laboratoriernas varierande behov. Efter centrifugering bildar gelen en barriär mellan celler och serum.

Blandningsrekommendation: BD SST™ II Advance ska blandas försiktigt 5-6 gånger.

Centrifugeringsanvisningar: BD SST™ II Advance kan centrifugeras på följande sett i rumstemperatur

- vid standardanvändning 1300-2000 G i 10 minuter
- vid kort centrifugering 1800 G i 4 minuter
- vid lågt g-tal 800 G i 10 minuter

Annat: Rören finns i ett antal olika storlekar och de har guldgul Hemogard™ förslutning.

BD SST™ II Advance gelen kombinerar följande fördelar för laboratoriets effektivitet:

- förbättrad provstabilitet, läkemedel är stabila efter någon av följande händelser; 4 timmar vid 25°C, 24 timmar vid 4°C eller 7 dagar vid 4°C.
- gelbarriärens stabilitet. Den nya gelen ger en stabilare barriär mellan serum och celler, vilket ökar flexibiliteten vid val av transport ex. kan rör-post användas.

Minsta rekommenderade koagulationstid för BD SST™ II Advance är 30 minuter om patienten inte behandlas med antikoagulantia.

BD art nr	Tillsats	Volym	Storlek (mm)	Färg	Etikett	Avd./Transp. förp
BD Vacutainer® SST™ II Advance-rör i plast med guldgul Hemogard™ förslutning						
366882	Koag.akt. / Gel	2,5	13 x 75 (5)		Papper	100/1000
367957	Koag.akt. / Gel	3,5	13 x 75 (5)		Papper	100/1000
368498	Koag.akt. / Gel	3,5	13 x 75 (5)		Transparent	100/1000
368879	Koag.akt. / Gel	4	13 x 100 (7)		Transparent	100/1000
367955	Koag.akt. / Gel	5	13 x 100 (7)		Papper	100/1000
366566	Koag.akt. / Gel	5	13 x 100 (7)		Transparent	100/1000
366444	Koag.akt. / Gel	6	16 x 100 (10)		Papper	100/1000
367953	Koag.akt. / Gel	8,5	16 x 100 (10)		Papper	100/1000
366644	Koag.akt. / Gel	8,5	16 x 100 (10)		Transparent	100/1000

Kontakta oss gärna för att få kopior av BD:s kliniska studier på BD Vacutainer™ SST™ II Advance-rör



2012

Becton Dickinson AB • Tlf: 08-775 51 00
bdsweden@europe.bd.com • www.bd.com