



Debrisoft® Lolly

Bruksanvisning

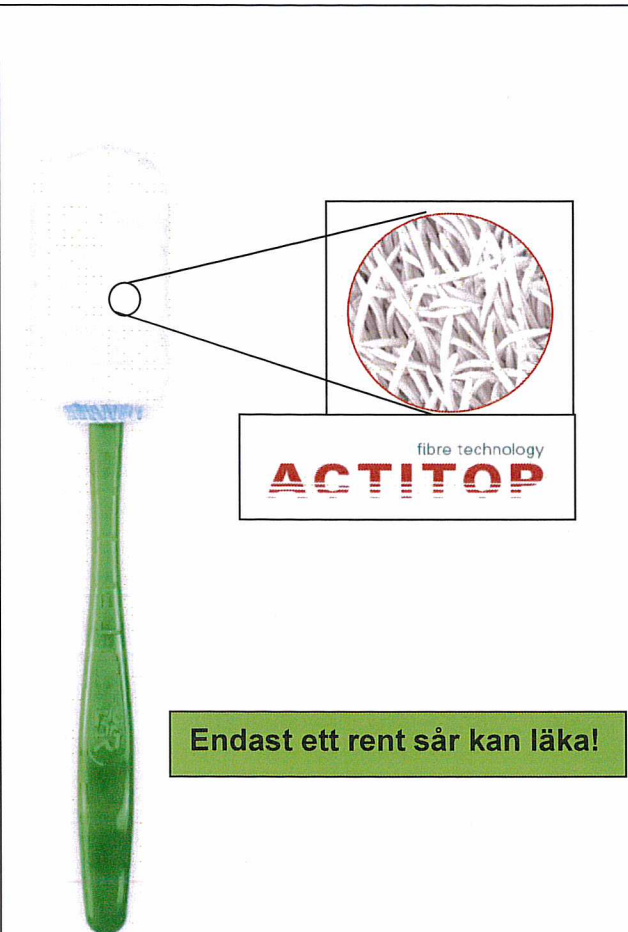

ACTITOP
fibre technology

Endast ett rent sår kan läka!

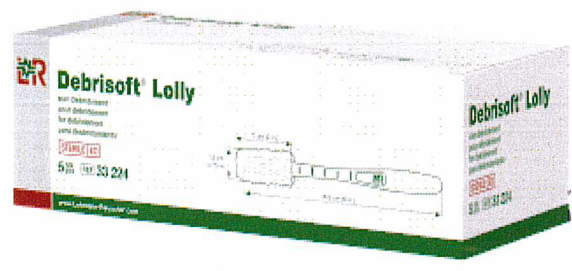

Debridering med Debrisoft® Lolly är en metod som rengör på ett snabbt, enkelt och mindre smärtsamt sätt och skonar intakt vävnad.

Debrisoft® Lolly

Huvudet på Debrisoft® Lolly består av monofilamenta polyesterfibrer med den unika Actitop tekniken. Huvudet är fastsytt med dubbla sömmar på ett handtag av polypropylen och har en kantsöm med blå röntgensynlig tråd.

Debrisoft® Lolly är endast avsedd för engångsbruk och får varken omsteriliseras eller återanvändas efter att förpackningen har öppnats. Produkterna är sterila så länge förpackningen förblir oöppnad och oskadad.

Indikationer:

Debrisoft® Lolly kan användas vid konditionering av sårbädd för debridering av djupa – samt även kirurgiskt invasiva - till ytliga sår t.ex:

- diabetessår
- arteriella och venösa sår
- trycksår
- postoperativa, sekundärläkande sår
- trauman, brännskador/skallskador

Material:

Huvuddelen består av monofilamenta polyesterfibrer, insida av polyakrylat samt röntgenstråd av polypropylen.

Skafet består av polypropylen.

Produkten är separat förpackad och EO-steriliserad.

Förpackningar:

Produktförpackning av cellulosa, polyester och polypropylen.

Avdelningsförpackning och bruksanvisning av cellulosa.

Transportkartong i wellpapp av cellulosa.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras rent och torrt i rumstemperatur.

Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum.

Produktklassificering:

CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIa-produkt.

Avfallshantering:


Produkten hanteras som brännbart avfall.

Produktförpackningen hanteras som brännbart avfall.

Avdelningsförpackningen källsorteras eller hanteras som brännbart avfall.

Debrisoft® Lolly

Bruksanvisning

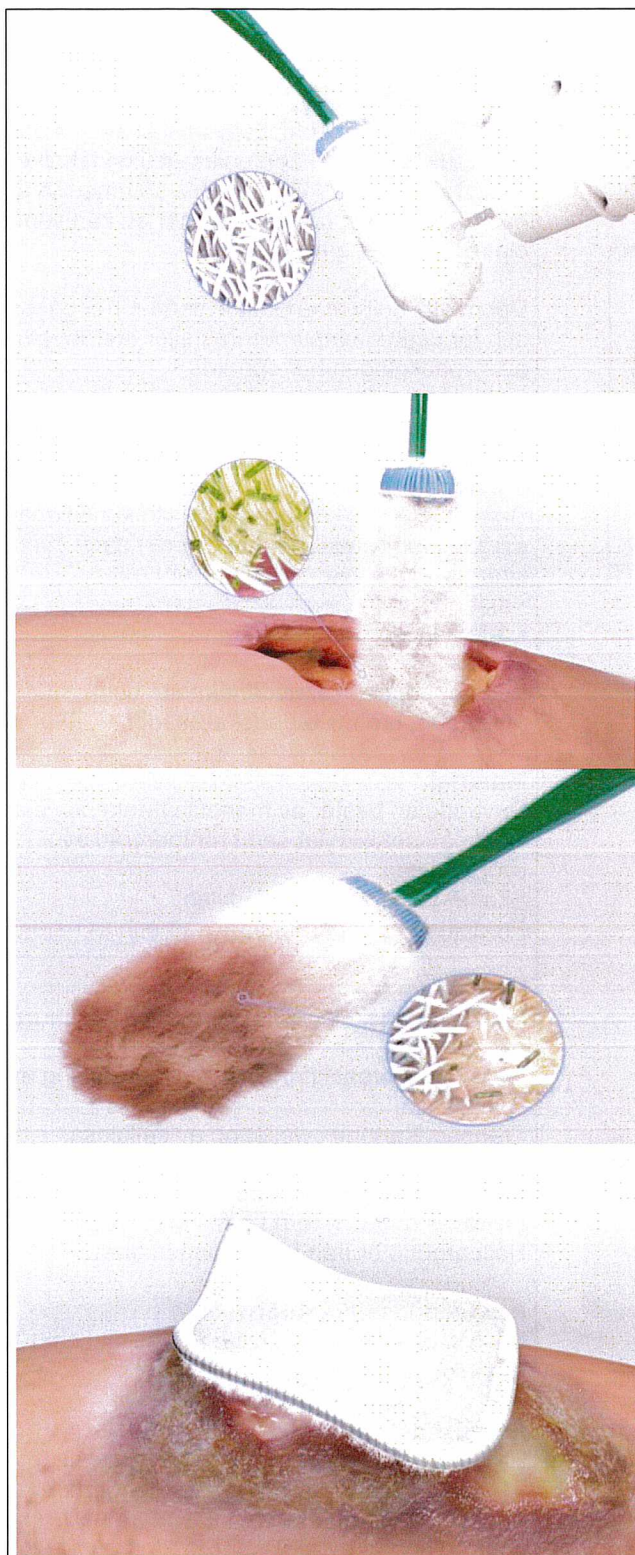

Bruksanvisning:

Fukta huvuddelen på Debrisoft® Lolly med t.ex. koksaltlösning eller vanligt vatten, enligt lokala riktlinjer och direktiv (rekommenderad volym för fuktning 5-15 ml).

Använd det mjuka fiberhuvudet på den fuktade Debrisoft® Lolly för att med lätt tryck göra rent såret och/eller de svåråtkomliga ställena.

Gör rent sårets omgivande hud med en fuktad Debrisoftdyna om det behövs.

Efter debrideringen ska standardbehandling, enligt gängse rutiner, genomföras.

Försiktighetsåtgärder:

- Låt inte Debrisoft® Lolly sitta kvar i såret.
- Produkten får inte användas vid känd överkänslighet eller allergi mot ett eller flera innehållsämnen.
- Får inte föras in i sår med en öppning som är mindre än huvudet på Debrisoft® Lolly.
- Huvudet på Debrisoft® Lolly får varken klippas till eller tas loss från handtaget.
- Undvik för kraftigt tryck, eftersom det kan orsaka smärta för patienten och/ eller skador på vävnaden.
- Var extra försiktig när produkten används vid fistlar med oklara förbindelser (t.ex. abdomen).
- Tänk på vid användning att förgreningar/ krökningar under vissa omständigheter inte kan nås.

Kontraindikationer:

Hittills inga kända

Biverkningar:

I mycket sällsynta fall kan huden utveckla intolerans eller allergier.

Storlekar:

Debrisoft Lolly finns i 1 storlek.

Lev.artnr	Storlek	Avdfp	Trpfp
33 224	5 cm (huvuddel) 15,5 cm inkl. skaft	5	50