



#### Hur vet jag om pumpen fungerar som den ska?

Den gröna indikatorlampan "✓" blinkar för att visa att systemet fungerar som det ska.

#### Vad visar indikatorlamporna?

Lamporna på pumpen visar om det är något som är fel:




Om den gula indikatorlampan "⚡" börjar blinka måste batterierna bytas inom 24 timmar. Slå av pumpen genom att trycka på den blå knappen i 3 sekunder och byt batterierna (se sidan 3). Tryck på den blå knappen i 3 sekunder för att slå på pumpen så börjar den gröna indikatorlampan "✓" att blinka för att bekräfta att systemet har startat igen.

Om batterierna inte byts inom 24 timmar slås pumpen av automatiskt och behandlingen avbryts. Den gula indikatorlampan "⚡" blinkar om du trycker på den blå knappen.




Den gula indikatorlampan "!" börjar blinka om det finns ett luftläckage från förbandet och pumpen kan då inte upprätthålla undertrycksbehandlingen. Pumpen stänger av sig efter 30 sekunder. Kontrollera att förbandet sitter ordentligt på plats och släta ut eventuella veck i förbandets kanter och på fixeringsremarna som kan vara orsaken till läckage. Kontrollera även att slangkopplingarna sitter ihop ordentligt. Starta sedan om pumpen genom att trycka 3 sekunder på den blå knappen. Då börjar den gröna indikatorlampan "✓" att blinka. Om den gula indikatorlampan "!" börjar blinka igen ska du upprepa processen med att släta ut veck och sedan trycka på den blå knappen igen. Om den gula indikatorlampan "!" tänds igen ska du kontakta behandlingsansvarig då ditt förband kan behöva bytas.

4.

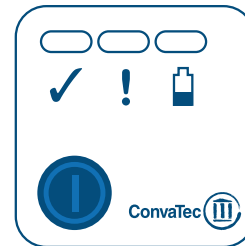

#### Vad gör jag om pumpen slutar fungera?

1. Om ingen av indikatorlamporna blinkar ska du trycka på den blå knappen i 3 sekunder. Om pumpen inte startar igen och om ingen av indikatorlamporna blinkar, ska du pröva att byta batterierna.

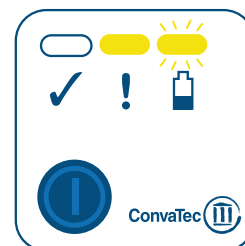

2. Om pumpen inte startar igen fastän du både har tryckt på den blå knappen och bytt batterierna, men de två gula indikatorlamporna "!" och "⚡" blinkar omväxlande, har pumpen gått över sin livstid på 30 dagar och du behöver en ny pump. Kontakta då behandlingsansvarig.

#### Kontakta genast behandlingsansvarig i följande fall:

- Du upplever irritation eller ökad smärta.
- Sårvätska läcker från förbandet.
- Du ser tecken på blödning.
- Huden runt såret blir röd, varm eller börjar göra ont.
- Förbandet lossnar eller ramlar av.

#### Kontakta behandlingsansvarig om du har andra frågor.

5.

För mer information om systemets funktion så kan du ringa ConvaTecs kundservice på: **020 - 21 22 22**  
9.00 – 16.00 måndag till fredag

[www.convatec.se](http://www.convatec.se)

Avelle är ett varumärke som tillhör ConvaTec Inc. ©2015 ConvaTec Inc. AP-016101-MM EM WCON739

 **ConvaTec**

**Avelle®**  
Negative pressure, positive power

## Sårbehandlingsystem med undertryck



#### Patientinformation

Du har fått den här broschyren eftersom ditt sår behandlas med Avelle® behandlingssystem med undertryck. **Läs informationen noga** och vänd dig till behandlingsansvarig person om du har frågor.

  
**ConvaTec**

## Sårbehandlingssystem med undertryck

### Vad är Avelle®-systemet?

Avelle®-systemet består av ett förband som är kopplat till en liten pump som skapar ett undertryck.



### Hur fungerar behandlingen?

Förbandet appliceras på såret och fästs med fixeringsremсор. Sedan kopplas förbandet till pumpen. När pumpen slås på skapas ett undertryck via förbandet så att luften sugas ut och sårvätska sugas upp i förbandet. Målet är att undertrycket som appliceras på såret i kombination med att sårvätskan med bakterier absorberas främjar läkningsprocessen.

### Varför används behandlingen på ditt sår?

Behandlingsansvarig person anser att du kan ha nytta av undertrycksbehandling och att Avelle®-systemet är lämpligt för dig.

### Kommer det att göra ont?


Första gången Avelle®-pumpen slås på kan du känna en sugande känsla, men om du känner smärta ska du säga till behandlingsansvarig.

### Hur länge måste jag använda systemet?

Det kan variera från patient till patient. Behandlingsansvarig kommer att prata med dig om hur länge behandlingen ska pågå i ditt fall. Samma förband kan sitta på i upp till 7 dagar och samma pump kan användas i upp till 30 dagar.

### Behöver förbandet bytas?

Ja. Hur ofta förbandet behöver bytas varierar från patient till patient och beror i hög grad på vilken typ av sår du har och hur mycket vätska det producerar. I vissa fall kan ett förband sitta på i upp till 7 dagar, i andra fall måste det bytas tidigare. Behandlingsansvarig talar om när det är dags att byta förbandet. Du kan känna ett visst obehag under förbandsbyte. Tala i så fall om det för den som byter förbandet.

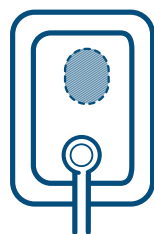

Förbandet sitter rätt.




Förbandet behöver bytas.




Förbandet behöver bytas.

### Ska jag koppla ur pumpen på natten?


Nej. För att undertrycket ska appliceras utan avbrott ska pumpen alltid vara ansluten till förbandet och påslagen (förutom när du duschar, se sidan 3). Systemet går tyst och bör inte störa dig på natten. Du bör se till att pumpen är på en trygg och säker plats medan du sover så att den inte kan ramla ned på golvet.

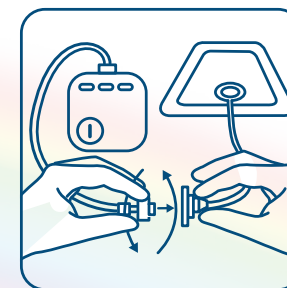

Slå av systemet genom att trycka på den blå knappen. Vrid isär kopplingarna för att koppla loss pumpen från förbandet innan du duschar.

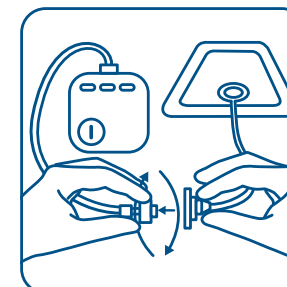

Vrid kopplingarna för att återansluta förbandet till pumpen och tryck på den blå knappen för att starta pumpen igen när du har duschat.

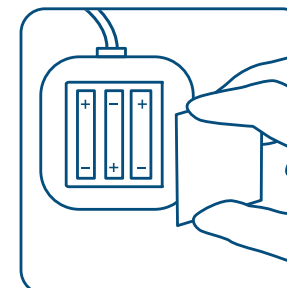

### Kan jag bada och duscha?

Du kan duscha, men ska undvika att bada och duscha direkt på förbandet. Före dusch måste pumpen kopplas loss från förbandet. Du gör detta genom att trycka på den blå knappen i 3 sekunder för att slå av pumpen (den gröna indikatorlampan "✓" slutar blinka och slocknar). Koppla sedan loss pumpen och eventuellt pumpslangen från förbandet genom att vrida isär kopplingarna. Placera pumpen på en säker och torr plats medan du duschar. När du är redo att återansluta pumpen vrider du ihop kopplingarna och slår på pumpen genom att trycka på den blå knappen i 3 sekunder. Den gröna indikatorlampan "✓" blinkar för att visa att systemet fungerar som det ska.

### Kan jag rengöra pumpen?

Ja. Rengör pumpen genom att torka av den med mjuk trasa som fuktats med mildt rengöringsmedel. Om den är kontaminerad med kroppsvätskor ska den torkas av med isopropanolbaserad eller vattenbaserad antimikrobiell tvättlösning. Pumpen får inte sänkas ner i någon vätska.

### Hur byter jag batterierna?

Om den gula indikatorlampan "⚡" börjar blinka måste batterierna bytas inom 24 timmars. Tryck på den blå knappen i 3 sekunder för att stänga av pumpen. Sätt i batterierna på pumpens baksida genom att ta bort batterilocket och sätt i tre stycken AAA-batterier enligt skissen i batterifacket (alkaliska batterier rekommenderas). Alla indikatorlamporna blinkar samtidigt en gång för att bekräfta att batterierna sitter rätt. Se till att batterilocket sitter fast ordentligt.