




Erizyme

Maskintvättmedel

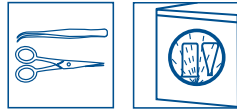

Maskintvättmedel med enzymbooster för tvätt- och desinfektionsmaskiner för hälsovårdens och munhälsovårdens instrument samt för ultraljudstvättar.

Användningsområde Instrumentvård, operationsavdelningar, tandvården. Lämpligt för krävande professionellt bruk och alla material som tål maskintvätt, bl.a. aluminium.

För professionell användning.

Produktegenskaper Erizyme är ett maskintvättmedel som utvecklats för krävande professionell användning. Dess neutrala pH-värde passar de flesta materialen. Tack vare den goda tvätteffekten minskar behovet av mekanisk förbehandling av redskap, vilket inte bara sparar tid utan kan även bidra till bättre arbetssäkerhet. Ett gott rengöringsresultat fås med liten dosering. Erizyme maskintvättmedlets tvätteffekt har undersökts med en undersökning av rengöringseffekten som utförts vid laboriet för hygien och mikrobiologi på Institutionen för folkhälsovetenskap, Hjelt-Institutet vid Helsingfors universitet. Erizyme innehåller bl.a. proteasenzym som lösgör effektivt proteinsmuts.

Bruksanvisning Anslut dunken till tvättmaskinens automatdispenser. Rekommenderad dosering i sköljande och tvättande desinfektionsmaskiner är 0,15–0,3 % lösning. I ultraljudstvättar 0,5–1 % lösning. Doseringen påverkas av materialet som tvättas och av vattenkvaliteten. Bästa resultat fås i en tvätttemperatur på 45–55 °C. Maskinen värmedesinficerar rengjorda och sköljda instrument och kammaren enligt det valda tvättprogrammet.

Obs Beakta vid påfyllning att vattenstrålarna når alla ytor på redskapen som ska tvättas. Lägg instrumenten som ska tvättas luftigt i maskinen. Använd vid behov specialställningar. Felfri funktion av maskinen ska kontrolleras regelbundet för ett säkert slutresultat. I ultraljudstvätten: skölj och torka instrumenten efter tvätten.

Sammanfattning	Activa ämen	Effekt
	Nonjoniska ytaktiva medel < 5 %	aktiva tvättämnen som tar bort fett
	Amfotera ytaktiva medel < 5 %	aktiva tvättämnen som påverkar vattenlösligheten och sköljbarheten
	Komplexbildande medel 5 - 15 %	binder kalcium och tungmetaller
	Monopropylenglykol 15-30 %	bryter ned fett, minskar löddrande och fungerar som konserveringsmedel
	Antiskummedel	polymerblandning, förebygger skumbildning och underlättar sköljningen
	Enzymer	proteas, bryter ned proteiner

pH konzentrat	7.5 neutral
pH brukslösning	7.5 neutral
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur, i temperaturer under 30 °C. Skyddas mot frysning. Hållbarhet 2 år från tillverkningsdatumet.
Utseende och doft	Gulaktig vätska
Tillverkningsland	FINLAND
Användar- och miljösäkerhet	Allvarliga tillbud orsakade av Erizyme maskintvättmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige). Läs bruks- och skyddsanvisningarna i säkerhetsdatabladet.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
3 x 5 l		8137	6417964081374	6417964482928
1 x 200 l		8157	6412600081572	
1 x 1000 l		8158	6417964081589	



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com