

Sorbact® minskar mängden mikroorganismer i sår på ett säkert sätt

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer. Mikroorganismer binds från sårbädden till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar sårhelingsprocessen genom att reducera mängden mikroorganismer utan att avge några aktiva ämnen till såret.²⁾

Underlättar sårhelning


Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till infektionsrisk och fördröjd sårhelning. Sorbact® reducerar mängden mikroorganismer på ett säkert sätt och förbättrar därmed förutsättningarna för såret att läka.

Binder både vanliga mikroorganismer och multiresistenta bakterier

Vanliga mikroorganismer i sår som t.ex. Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, binder till den unika Sorbact®-ytan. Sorbact® binder också MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus).¹⁾

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårförband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i mer än 65 länder runt om i världen. I vissa länder säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®.

1. Ronner AC, et al. Adhesion of methicillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care 2014; 23(10):484, 486-488. 2. Ljungh Å, et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care 2006; 15(4):175-180.

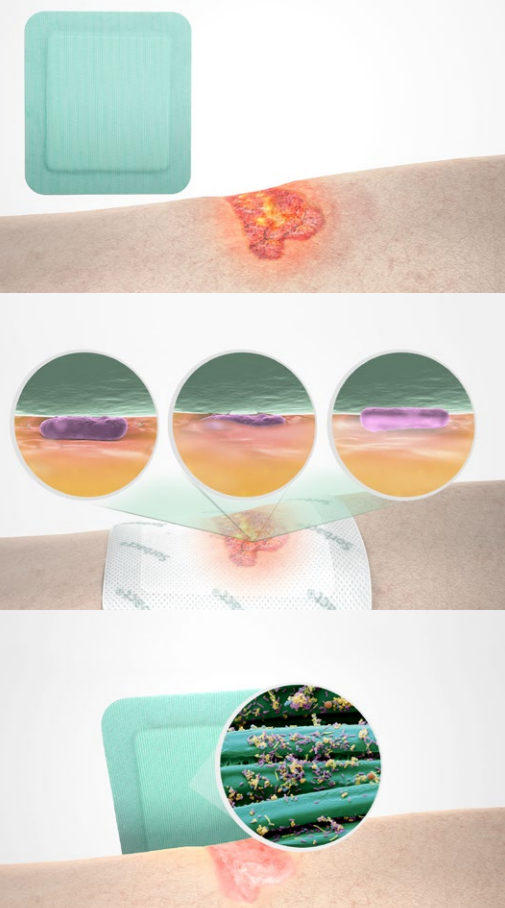

Appliceras

Sorbact® appliceras så att dess gröna yta är i direktkontakt med sårbädden.

Binder

Mikroorganismer binds från sårbädden till förbandet i närvaro av fukt.

Avlägsnar

Bundna mikroorganismer avlägsnas vid byte av förband.

Sorbact® sortiment

Sorbact® Gel Dressing Gelkompress			Sorbact® Compress Kompress		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98139	3x15 cm	10	98128	4x6 cm	40
98136	7,5x7,5 cm	10	98125	7x9 cm	40
98137	7,5x15 cm	10			

Sorbact® Surgical Dressing Kirurgiskt förband			Sorbact® Ribbon Gauze Tamponad		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98140	5x7,2 cm	100	98118	1x50 cm	20
98141	8x10 cm	20	98121	2x50 cm	20
98142	8x15 cm	20			
98143	10x20 cm	20			

Sorbact® Round Swab Rundtork			Sorbact® Foam Dressing Skumförband		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98126	Ø 3 cm	70 (5 x 14)	98310	10x10 cm	10
			98315	15x15 cm	10

Sorbact® Foam Gentle Border Skumförband med silikonkant			Sorbact® Absorption Dressing Absorptionsförband		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98531	7,5x7,5 cm	10	98224	7x9 cm	20
98532	10x10 cm	10	98222	10x10 cm	20
			98223	10 x 20 cm	10

Sorbact® Superabsorbent Superabsorberande förband					
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
98501	10x10 cm	10	98503	20x20 cm	10
98502	10x20 cm	10	98504	20x30 cm	10

Apotekssortiment

Sorbact® Secure			Sorbact® Absorption		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
210770	5x7,2 cm	5	268078	7x9 cm	5

Sorbact® Compress			Sorbact® Fungi		
Art. nr	Storlek	St/förpackning	Art. nr	Storlek	St/förpackning
765118	4x6 cm	3	210769	10x200 cm	1
268102	7x9 cm	10			



DJURVÅRD

Sorbact® användarguide

Förebygger och behandlar sårinfektioner



2019-99



ANVÄNDARGUIDE

Sorbact® för alla typer av sår – i alla stadier

Sorbact® finns för alla olika typer av sår. Eftersom Sorbact®-förband inte avger några aktiva ämnen till såret kan det användas redan från början till alla patienter för att förhindra infektion. Förbanden kan användas även för att minska mängden mikroorganismer vid korttids- eller långtidsbehandling av redan infekterade sår.

POSTOPERATIVT	
NY SKADA	
KOLONISERAT/INFEKTERAT	
NEKROTISKT/TORRT FIBRINÖST	
YTTLIGT	
KAVITETER	
FISTLAR	

- Torrt
- Ytligt
- Infektionsprevention
- Lätt
- Grunt
- Infekterat
- Måttligt
- Grunt + djupt
- Nekrotiskt
- Rikligt

	Sorbact® Gel Dressing	Sorbact® Compress	Sorbact® Surgical Dressing	Sorbact® Ribbon Gauze	Sorbact® Round Swab	Sorbact® Foam Dressing	Sorbact® Foam Gentle Border	Sorbact® Absorption Dressing	Sorbact® Superabsorbent
Användningsområde	För torra eller lätt vätskande sår, samt brännskador. Tillför fukt.	För ytliga sår och kaviteter.	För infektionskontroll av kirurgiska och traumasår. Duschbar baksidesfilm.	För kavitet/fistel samt svampinfektioner i hudveck.	För kaviteter.	För sår med låg till måttlig mängd sårvätska. Semi-permeabel baksidesfilm.	För sår med måttlig mängd sårvätska. Semi-permeabel baksidesfilm. Skonsam fixering med mjuka silikonkanter.	För måttligt vätskande sår.	För sår med riklig till mycket riklig mängd sårvätska.
POSTOPERATIVT									
NY SKADA									
KOLONISERAT/INFEKTERAT									
NEKROTISKT/TORRT FIBRINÖST									
YTTLIGT									
KAVITETER									
FISTLAR									
Bruksanvisning	Applicera direkt på sårytan (ej på omgivande hud). Kan ligga i flera lager. Vid kavitet/fistel: Låt alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas. Täck med ett lämpligt fuktighetsbevarande sekundärförband.	Bruksanvisning Applicera direkt på sårytan. Vid kavitet: Vik upp och fluffa upp ett eller flera förband och klä/fyll kaviteten. Undvik att packa tätt. Täck med ett sekundärförband.	Bruksanvisning Ta bort skyddsfilm från särkontaktytan. Applicera förbandet över såret på renrakad hud. Tryck kanterna mot den omgivande huden. Ta bort den stabiliserande filmen på ovansidan. Börja vid den blå markören.	Bruksanvisning Vid kavitet/fistel: Klä/fyll kaviteten eller fisteln. Lämna ena änden på fistelns utsida. Undvik att packa tätt. OBS: Lämna alltid de klippta ändarna utanför såret. Vid svampinfektion i hudveck: Applicera ett lager i direktkontakt med den infekterade ytan. Fäst på frisk hud.	Bruksanvisning Placera rundtorken i kaviteten. Täck med ett sekundärförband.	Bruksanvisning Applicera den gröna sidan direkt mot sårytan. Fixera på lämpligt sätt. Kan fixeras med suturer.	Bruksanvisning Ta bort skyddsfilm från särkontaktytan. Applicera förbandet över såret på renrakad hud. Välj en storlek där kanterna ligger mot torr hud. Tryck försiktigt längs kanterna.	Bruksanvisning Applicera den gröna sidan direkt mot sårytan. Fixera på lämpligt sätt.	Bruksanvisning Applicera den gröna sidan direkt mot sårytan. Fixera på lämpligt sätt.

Behandlande veterinär ska säkerställa att produkten används enligt tillverkarens bruksanvisning.