



Produktblad Nordic Biolabspositionsnr107

Produktnamn:Flockad pinne NPH peelpack Nyl/Velvet

**Antal /
förp** 1000st

Material: . Flexibelpernasal flockad swab, nylon spets, Applikator I plast, steril, individuellt förpackad

Tillverkare: Copan Italia

Artikelnr: [CP503CS01](#)

Användningsområde: provtagning av kliniska prover för senare analys. Provtagningspinnen är lämplig för kort kontakt med kroppen. Produkten skall användas enligt dessa föreskrifter. Copan är inte ansvarig för annan användning. (För diagnostiskt bruk *In vitro*)

Försiktighetsåtgärder:

-Var noga med att följa användarinstruktionerna.

När provtagningspinne i plastmaterial används ska trycket vara lätt så att pinnen inte går av.

-Fibrernas vidhäftningsförmåga till provtagningspinnen är testad för ögonblicklig provtagning. Vid längre kontakt med provtagningsstället kan fibrer lossna.

-Om svabben utsätts för kemisk eller fysisk sterilisation eller biostatiska processer kan den tänkta funktionen förändras.

Förvaring:

Torr i rumstemperatur (2-30°C)

Produktförsämring:

Innehållet i en öppnad och hel förpackning är garanterat steril. Använd inte om systemet är skadat, uttorkat eller kontaminerat. Använd inte vid passerat utgångsdatum.

Användarinstruktion:

-öppna förpackningen där det står "peelhere"

- Ta ut provtagningspinnen från förpackningen och utför provtagningen.

Under provtagningen skall provtagningspinnen endast vara i kontakt med provtagningsområdet.

Detta för att minska kontaminationsrisken.

Exempel på provtagning



Steg 1. Vätska absorberas mellan de vinkelräta fibrerna med hjälp av kapillär kraft.



Steg 2. Roterar Pinnen två till tre gånger och håll kvar den i 5 sekunder för att garantera maximal absorption



Steg 3. Placera pinnen i transport mediet och bryt av den vid den markerade brytpunkten.

WARNING: Använd inte så mycket kraft att provtagningspinnen går av under provtagning.

- Stoppa provtagningspinnen i transportröret.
- Skriv namn och personnummer på rörets etikett.
- Skicka provet till laboratoriet för omedelbar analys

CE 0344

För diagnostiskt bruk *In vitro*



Box 7293, 187 14 Täby, Tel.: 08-630 85 00, Fax: 08-630 09 05, Order: 08-630 85 10
info@nordicbiolabs.se, www.nordicbiolabs.se