


Användningsområden

Med hjälp testmedlet Ecocontrast genomför man en normal handdesinfektion. Händerna belyses sedan i HandCheck Vision boxen, där ett bra resultat är vitt medan oberörda ställen är mörka.

HandCheck Vision används för hygienutbildning inom sjukvården, livsmedelsindustrin och den farmakologiska industrin. Den används för att på ett enkelt och tydligt sätt se hur en handdesinfektion har genomförts. Ett utmärkt hjälpmedel för ambulerande undersökningar, såväl som i utbildningssyfte av ny personal. Till utrustningen kan man även ansluta en kamera samt PC via USB-port (extra utrustning).

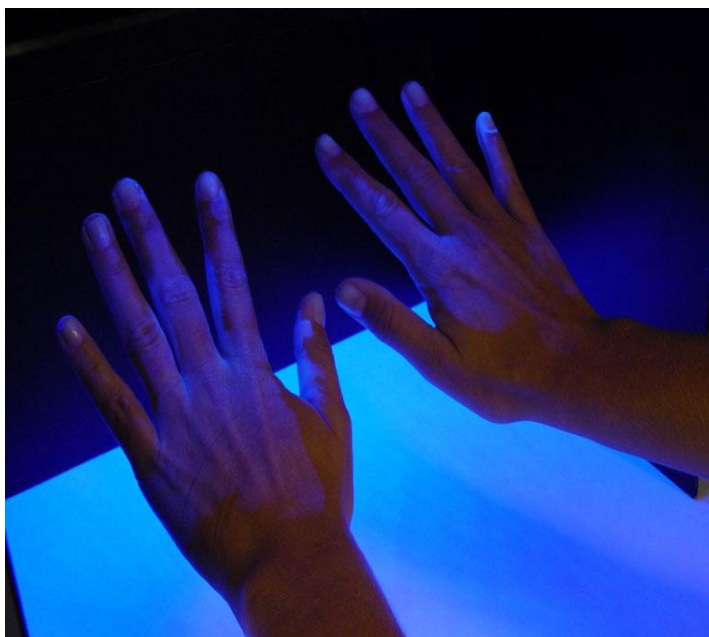

Ecocontrast

Ecocontrast är ett testmedel som används i undervisningssyfte för på ett enkelt och tydligt sätt se hur en handdesinfektion har genomförts. Den levereras med pump och är en färdig brukslösning.

Genomför handdesinfektionen med Ecocontrast på vanligt sätt enligt EN 1500 alt. EN 12791. Belys därefter händerna i HandCheck vision boxen. De områden som lyser vitt är de ställen som täckts med handdesinfektion, medan mörka ställen har missats.

Notera: Ecocontrast får endast användas i undervisningssyfte. Skall ej användas i dagligt bruk för hygienisk eller kirurgisk handdesinfektion.

Förpackningsstorlek
600 ml

Antal/frp
6st

Art. Nr
32232