



Kiilto Pro Steel

Surt specialrengöringsmedel



Surt specialrengöringsmedel för borttagning av kalk- och rostavlagringar samt oxidhinnor från sjukvårdsinstrument och diskdesinfektorer.

Användningsområde	Specialprodukt för instrument och diskdesinfektorer: Lämplig för manuella och maskinella metoder, även för användning i ultraljudsrengörare. För rostfritt stål, plast, silikonmaterial, de flesta aluminium-, mässing- och kopparmetaller.		
	Medicinteknisk produkt. För professionell användning.		
Produktegenskaper	Steel är en specialprodukt för borttagning av ytliga kalk- och rostavlagringar samt oxidhinnor från instrument och diskdesinfektorer. Tar även bort fläckar från silikon- och plastytor. Steel gör metallytor blanka. Produkten är lätt att skölja bort.		
Bruksanvisning	Rengöring i diskdesinfektorer: 100–300 ml (utspädning 0,5–1,5 %), avkalkningsprogram. Säkerställ att inga andra diskmedel används samtidigt. Rengöring av instrument: 20 % lösning (2 dl/0,8 l vatten) i varmt vatten, blötläggningstid 30–60 min. Vid avlagringsrester, torka ytan. Tvätta och skölj instrumenten direkt efter blötläggning. I ultraljudsrengörare: 20–200 ml/1–0,8 l varmt vatten. Blötläggning av instrument 30 minuter, varefter ett 10 minuters program med noggrann sköljning.		
Obs	Lösningen som används ska bytas ut dagligen. Produkten är sur. Får inte blandas med klorhaltiga medel. För att undvika frätningsskador får produkten inte torka på ytorna.		
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt	
	Organiska syror	15-30 %	löser upp avlagringar
	Glykoleter	5-15 %	lösningsmedel, förbättrar rengöringseffekten
	Nonjoniska yttaktiva medel	< 5 %	ytfuktare, aktivt tvättämne
pH koncentrat	1.5 starkt sur		
pH brukslösning	3.0 sur		
Utseende och doft	Klar vätska, karaktäristisk doft		
Tillverkningsland	FINLAND		
Användar- och miljösäkerhet	Allvarliga tillbud orsakade av Steel surt specialdiskmedel ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).		

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
	8223	6417964082234	6417964486476
6 x 1 l	8224	6417964082241	6417964482935



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.