



Snabb referensguide – sv

Alaris™ GW 800 volumetrisk pump


SCANDI
VET





- Den här handboken innehåller inga omfattande anvisningar för inställning och drift av Alaris™ GW 800 volumetrisk pump.
- Fullständig information om pumpen finns i bruksanvisningen till Alaris GW 800 volumetrisk pump.
- Alla personer som använder pumpen ska läsa bruksanvisningen.


Kontroller

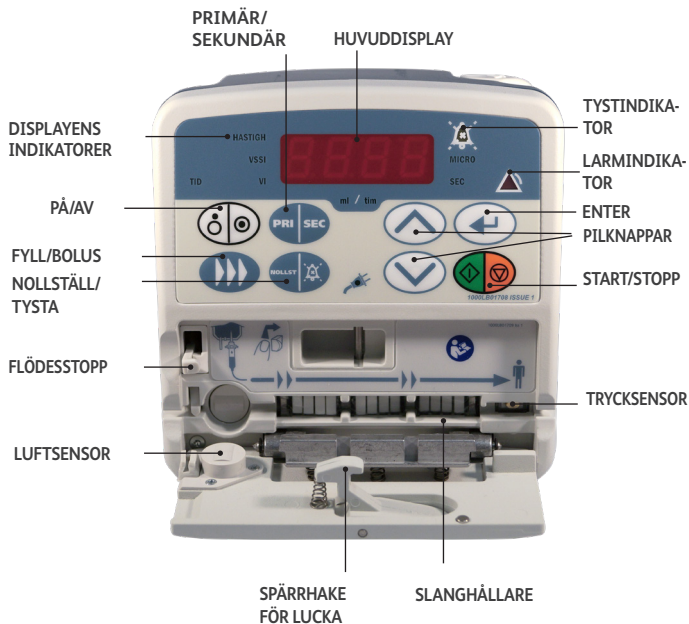

Symbol	Beskrivning
	PÅ/AV – Starta pumpen genom att trycka en gång. Tryck och håll ned knappen i ungefär tre sekunder när du vill stänga av pumpen.
	START/STOPP – Startar och stänger av infusionen.
	NOLLSTÄLL/TYSTA – Tystar larm eller uppmaningar i 1 minut. Ljudet från larmet eller uppmaningar hörs igen efter denna tid. Återställer numeriska värden till noll. Obs! För att återaktivera larmljudet, tryck på någon annan knapp eller tangent.
	FYLL/BOLUS – Fyller infusionsaggregatet. Tillför bolus under infusionen.
	PRIMÄR/SEKUNDÄR – Växlar mellan primärt och sekundärt infusionsläge (om detta är aktiverat).
	BEKRÄFTA – Växlar mellan hastighet, tid, maxvolym och total infunderad volym. Anger värden för valda infusions/konfigurationsparametrar. Bekräftar hastigheten under en infusionstitrering.
	PILAR – Ökar eller minskar infusionshastigheten, gränsen för tid och maxvolymen. Håll ned denna knapp för snabbare val. Används för justering av användaralternativ

Kontroller, forts.

Symbol	Beskrivning
	NÄTSTRÖM – När den är tänd är pumpen ansluten till nätströmmen.
	LARM -indikator – När denna blinkar indikerar det att pumpen är i ett larmläge.
	TYST -indikator – När denna blinkar indikerar det att pumpens ljudlarm är tystat.
HASTIGH	När denna lyser visar pumpen infusionshastigheten i milliliter per timme (ml/tim).
VSSI	När denna lyser visar pumpen maxvolymen i milliliter (ml).
VI	När denna lyser visar pumpen den infunderade volymen i milliliter (ml).
TID	När denna lyser visar pumpen infusionstiden i timmar:min.
MICRO	När denna lyser arbetar pumpen i mikroläge. När indikatorn inte lyser arbetar pumpen i standardläge.
SEC	När denna lyser arbetar pumpen i sekundärt läge. När indikatorn inte lyser arbetar pumpen i primärt läge.
ml/tim	(Milliliter/timme) När ml lyser visar pumpen hastighet, maxvolym eller infunderad volym. När tim lyser visar pumpen hastighet eller infusionstid.

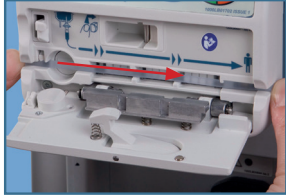	1. Förbered vätskebehållaren. Kläm ihop droppkammaren tills vätskan når fyllningslinjen (i förekommande fall). Stäng slangklämmen.
	2. Öppna luckan genom att trycka på spärrhaken.
	3. Lossa flödesstoppmekanismen genom att trycka spaken uppåt och åt höger.
	4. Sätt i infusionsaggregatet från vänster till höger i pumpkanalen. Undvik att infusionsaggregatet hänger slakt och undvika sträckning eller drag i slangen. 5. Aktivera flödesstoppmekanismen genom att trycka spaken åt vänster och nedåt.
	6. Stäng luckan. Tryck på fördjupningarna, enligt bilden, så att spärren klickar på plats.

	1. Starta pumpen.
	2. Öppna slangklämman. Se till att inga droppar faller ned i droppkammaren. Fyll infusionsaggregatet genom att trycka på . Medan FyLL visas ska du trycka på  igen och hålla kvar så att all synlig luft försvinner från slangen.
	3. Koppla infusionsaggregatet till patientens infart. Ange hastigheten med  / . Tryck en gång på  för att bekräfta hastigheten och gå till maxvolym.
	4. Ange en maxvolym med  / . Om du använder droppsensorn kan du stänga av funktionen för maxvolym genom att bläddra tills OFF visas. Tryck en gång på  för att bekräfta maxvolymen och gå till infunderad volym.
	5. Tryck vid behov på  så att värdet för infunderad volym nollställs.
	6. Tryck på  för att starta infusionen.

Användaralternativ

Pumpen måste vara i VÄNTELÄGE. Tryck på .

Kontrollera batteristatus

Obs! Endast tillgängligt när pumpen drivs på batteri. Tryck på och håll ned  i 2 sekunder tills Batteristatus visas:




- Batteriet har mer än 30 minuters körtid kvar.
- Låg batterinivå och har ungefär 30 minuters eller kortare körtid kvar.

Tryck på  för att gå till nästa alternativ.

Välja ocklusionstrycknivå (om aktiverat)

Alternativet **tryc** visas:

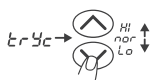

- Ändra ocklusionstrycksnivån till **HI** **nor** eller **Lo** med  / .
- Tryck på  som bekräftelse och gå till nästa alternativ.

Välja larmvolym (om aktiverat)

Alternativet **ton** visas:



- Ändra larmvolym mellan 1 och 7* med  /  Tryck på  som bekräftelse och gå till nästa alternativ.

* 1=Låg, 7=Hög

Välja maxvolym/tidsinfusion (om aktiverat)

Alternativet **tid** visas:



- Välj **On** eller **OFF** med knapparna  /  när du vill aktivera/inaktivera inställningen av maxvolym/tidsinfusion**.
- Tryck på  som bekräftelse och gå till nästa alternativ.

** Kontrollera att indikator **tid** lyser när alternativet är **On**.

Välja mikroläge (om aktiverat)

Alternativet **0.0** visas:



- Välj **On** eller **Off** med knapparna  /  när du vill aktivera/inaktivera mikroläget***.
- Bekräfta genom att trycka på .

*** Kontrollera att indikatorn **MICRO** lyser när alternativet är **On**.

Panellås

Panellåsningen förhindrar vissa viktiga funktioner:



Hastighetstitring

Om du vill ändra hastighet vid infusion (om titring är aktiverat):

1. Tryck på / för att justera hastigheten.
2. Tryck på för att bekräfta hastighetsändringen.

Administrera BOLUS: Tryck på

Så här administrerar du bolus vid infusion:

- Tryck på . Medan **bol** visas trycker du på igen och håll ned för att administrera den önskade bolusvolymen.

Ett larm visar att infusionen har stoppats. Kontrollera om det finns något larmmeddelande på displayen. Tryck på  om du vill tysta ljudet. (Undantag är *Err*- och *bAt*-larm, som inte kan tystas.) När orsaken har åtgärdats trycker du på -tangenten för att återuppta infusionen.



Samtliga larm stoppar infusionen utom *Lo bAt* och *Attn*, där infusionsstatus kvarstår i samma läge som innan larmet.

Larm/tillstånd	Åtgärd
Luft Occl Luft i slangen Uppströms ocklusion	- Koppla bort infusionsaggregatet från patientens infart och använd påfyllningsfunktionen. - Avlägsna ocklusionen/luften och starta om infusionen.
bAt Det inbyggda batteriet är urladdat.	- Anslut pumpen till nätström. - Se till att pumpen är påslagen så att det inbyggda batteriet laddas.
dörr Luckan är öppen	Stäng luckan och starta om infusionen.
Err Systemfel	- Stäng av pumpen. - Ta pumpen ur drift och låt behörig servicepersonal undersöka den.
FLöd Err Flödesfel Droppsensor ansluten till sekundärt infusionsaggregat.	- Stäng slangklämman. - Kontrollera att slangen är korrekt ansluten. - Kontrollera att det finns gott om vätska i vätskebehållaren. - Ta bort blockeringen. Stäng pumpluckan. - Starta om infusionen. - Kontrollera att droppsensorn är ansluten till det primära infusionsaggregatet.
FLöd SenS Anslutningsfel för droppsensor.	Anslut droppsensorn till pumpen och starta om infusionen. Kontrollera att vätskan i droppkammaren inte når över påfyllningslinjen.
Hi bryc Ocklusion nedströms	- För att förhindra bolus efter ocklusion måste du avlägsna trycket i infusionsaggregatet. - Ta bort orsaken till blockeringen. - Starta om infusionen.


Larm/tillstånd	Åtgärd
Err SEt Felaktigt infusionsaggregat, aggregatet sitter fel eller aggregatet är använt.	Använd infusionsaggregatet enligt bruksanvisningen. Kontrollera att infusionsaggregatet är korrekt isatt i pumpen.
End Förinställd infusionsvolym infunderad med MINFLÖDE avstängt.	Ange ny maxvolym.
Lo bAt Låg batterinivå. (minst 30 min återstår till bAt-larm)	Anslut pumpen till en nätströmkälla.
Attn Pumpen har lämnats utan tillsyn i 2 minuter och infusionen har inte startat.	Kontrollera pumpen och åtgärda felet.

Uppmaningar varnar användaren och indikeras av ett hörbart larm, ett meddelande på displayen eller både och.

Kontrollera om det finns ett uppmaningsmeddelande på displayen.

Tryck på  om du vill tysta ljudet.

Uppmaning/tillstånd	Åtgärd
<i>bol</i> Bolus tillförs.	Släpp -tangenten och återgå till infusionen när korrekt bolus har administrerats.
<i>End</i> Maxvolymgränsen har nåtts.	Pumpen infunderar i minflödes hastighet tills du trycker på .
<i>FYLL</i> Pumpen fyller infusionsaggregatet.	Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i infusionsaggregatet innan infusionen startar.
<i>PAUS</i> Pumpen är i vänteläge.	Tryck på  att starta om/fortsätta infusionen eller tryck på  för att återgå till inställningarna.
<i>TEST</i> Automatisk kontroll av infusionsaggregatet.	Testet ska vara avslutat innan pumpen används igen.

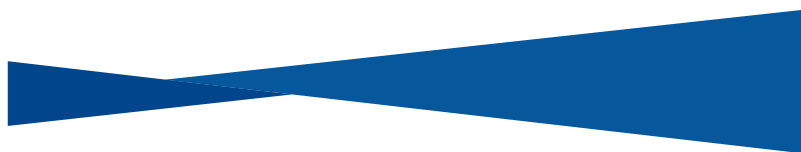

bd.com



© 2018 BD. BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company.