

evercare® Silikon Skumförband Border Sakrum, steril

REF: ESF175170FS, ESF230230FS

evercare® Silikon Skumförband Border har en avancerad femlagsstruktur som består av en mjuk silikonkontaktyta för såret, ett överlägset absorberande polyakrylatfiberlager, ett nonwoven-lager, ett polyuretanskumlager och en ånggenomsläpplig och vattentät polyuretanfilm. evercare® Silikon Skumförband Border är ett högabsorberande förband som absorberar sårvätska och bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet kan också användas som en del av profylaktisk behandling för att hjälpa till att förebygga trycksår. evercare® Silikon Skumförband Border (Sakrum) är utformat för applicering i sakralområdet.

Egenskaper

- ▶ Absorberar exsudat
- ▶ Upprätthåller nödvändig fuktig sårmiljö
- ▶ Avancerad 5-lager struktur
- ▶ Bekväm applicering och borttagning



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
ESF175170FS	Silikon Skumförband Border Sakrum, steril, Beige	17,5x17 cm	10 / 200
ESF230230FS	Silikon Skumförband Border Sakrum, steril, Beige	23x23 cm	10 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:	De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Biologisk utvärdering:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
I enlighet med legala krav:	Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745, MDR Class IIb
Uppfyller produktstandard:	EN 13726-2, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etiketter och förpackningskrav:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Spärrskikt	Polyuretan
Superabsorberande lager	Spunlace nonwoven
Nonwoven spridningsskikt	Polyakrylatfiber
Skumlager	Polyuretan
Sårkontaktlager	Silikongel av medicinsk kvalitet
Skyddspapper	Polyeten

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad. Använd inte produkten med oxidationsmedel som väteperoxid eller hypokloritlösningar. I avsaknad av tillgängliga data som stöder användningen av detta förband på känsliga personer såsom spädbarn, barn, gravida eller ammande kvinnor, och i avsaknad av motsatta data för dessa personer, bör detta förband användas med försiktighet enligt klinikers rekommendation.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 5 - 40 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	ESF175170FS: 245 x 230 ESF230230FS: 295 x 280
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	ESF175170FS: 231 x 50 x 238 ESF230230FS: 281 x 50 x 298
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet, Kartong	ESF175170FS: 516 x 482 x 276 ESF230230FS: 582 x 318 x 276
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
ESF175170FS	06940610131609	06940610131616	06940610131623
ESF230230FS	06940610131661	06940610131678	06940610131685

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.

